

MONTAGEHANDLEIDING

ROLLINOVA® Bumpermontage RHI200BM

t.b.v. Bumpermontage op de scootmobiel



Inhoud van de doos:

1. Rollinova®buis
2. Framesteun compleet
3. Buis van de framesteun
4. Wielsteun
5. Vergrendelsteun
6. Sterknop framesteun
7. Sterknop Rollinova®buis
8. Verstelbare montagesteunen (2x)
9. Houder voor Rollinova®buis

Om te fixeren zijn 7 tapbouten geplaatst in de onderdelen 2,4,8 en 9. In onderdeel 2 is hiervoor een inbusbout geplaatst.

Montagegereedschap:

Sleutel 13 en inbussleutel 5.

Let op:

Altijd alle tapbouten zodanig losdraaien dat de Rollinova®buis (1) in de onderdelen 2,4 en 9 geplaatst kan worden bij onderstaande montage!

Volgorde van montage:

Let op: De scootmobiel dient eerst voorzien te worden van een bij te bestellen montageset. Na montage hiervan zijn er 2 rechtopstaande vierkante kokers aanwezig in de buurt van de bumper. Hierop kan nu volgens onderstaande stappen de Rollinova® Bumpermontage worden gemonteerd.

Stap 1: Schuif beide verstelbare montagesteunen (8) in de houder voor Rollinova®buis (9). De middelste tapbout van de houder voor Rollinova®buis (9) moet hierbij naar rechts wijzen! Zie ook hiervoor de afbeelding hierboven.

Stap 2: Plaats nu beide verstelbare montagesteunen (8) over de kokers van de montageset op de scootmobiel.

Stap 3: Schuif nu de houder voor Rollinova®buis (9) in het midden en zet alle 4 de tapbouten (2x van nr 8 en 2x van nr 9) goed vast.

Stap 4: Schuif nu links de framesteun compleet (2) over de Rollinova®buis (1) met hierbij de sterknop van de framesteun (6) naar boven gericht en de sterknop van de Rollinova®buis (7) rechts naar achter gericht. Deze nog niet vastzetten met de tapbout. De plaatsing van onderdeel (3) volgt pas bij de handleiding : Rollinova® Rollatorhouder afstellen op uw rollator.

Stap 5: Schuif nu, zoals afgebeeld, rechts vanaf onder de wielsteun (4) ongeveer 5cm over de Rollinova®buis (1) en zet deze wielsteun (4) goed vast met de tapbout.*

Stap 6: Plaats nu de Rollinova®buis (1) in de houder voor Rollinova®buis (9). Hierbij is de onderkant van de Rollinova®buis (1) gelijk aan de onderkant van de houder voor de Rollinova®buis (9).

***Let op:** De onderkant van de wielsteun (4) moet altijd minimaal 25cm boven de weg zitten i.v.m. de stoephoogte. Verstel deze dus eventueel nog als deze lager zit na bovenstaande montage.

De Rollinova® Bumpermontage is nu gereed om éénmalig ingesteld te worden op uw rollator.


De juiste hoogte van de Rollinova®buis (1) in de houder (9), hoogte van de framesteun (2) en de instelling van de buis van de framesteun (3) worden beschreven in:

Rollinova® Rollatorhouder afstellen op uw rollator



WAARSCHUWING:

- De Rollatorhouder beweegt bij inveren van de scootmobiel (meestal) naar voren. De Rollatorhouder mag hierbij echter nooit een tas / mand of rugleuning raken! Controleer dit dus altijd!
- Houd er rekening mee dat wanneer u de rollator vervoert, u aan de achterzijde wat uitsteekt!
- Bij het vervoeren van de rollator, dient u extra voorzichtig te rijden!
- Het is mogelijk dat de geplaatste rollator de achterlichting van de scootmobiel minder of slecht zichtbaar maakt! Is dit het geval, rijd dan op het trottoir of het voetpad indien het donker is of bij dichte mist.
- **Tip!** plaats een rood fietslampje (op batterijen) op uw rollator of op de Rollinova®buis (1) om uw zichtbaarheid in het donker te vergroten. Zie afbeelding hiernaast.

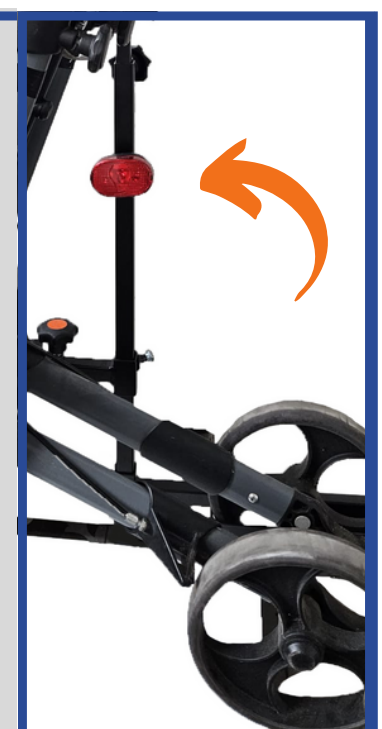

Gepatenteerd product NL1044157

Fabrikant Inova Revalidatietechniek Vof- Radonstraat 169- 2718SV -Zoetermeer www.rollatorhouder.nl