

GEBRUIKSAANWIJZING

ROLLINOVA® Rollatorhouder



Stap 1: Draai de onderste sterknop (zie pijl) van de framesteun los en klap de framesteun naar u toe.



Stap 2: Draai de onderste sterknop weer vast. U kunt de zijwaarts ingevouwen rollator gaan plaatsen op de Rollinova® Rollatorhouder.



Stap 3: Zet de rollator op de handrem. Til de rollator over de framesteun heen en plaats het rechter achterwiel van de rollator in de wielvanger.



Stap 4: Laat de rollator nu zakken met beide framebuizen op de framesteun. De rollator zit nu ook zijdelings opgesloten tegen het kunststof gedeelte van de framesteun aan (zie onderste pijl).



Stap 5: Draai de bovenste sterknop los. Haal de vergrendelsteun uit de houder en plaats deze vervolgens met de gebogen pen naar u toe gericht terug in de houder. Duw de vergrendelsteun stevig naar beneden op de zitbuis. De gebogen pen moet **tussen beide zitbuizen** komen! Draai nu de sterknop weer vast.



Stap 6: De rollator is nu gereed om vervoerd te worden.

ROLLINOVA®
Dé ideale rollatorhouder